

**DUOLITH® SD1 »T-TOP«**  
КОМБИНИРОВАННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ



**STORZ MEDICAL**

STORZ MEDICAL

ESWT *unlimited*

Mode    ▲    Menu

F-SW R-SW 1  
V-ACTOR 

0.50 mJ/mm<sup>2</sup>    Energy +/-

500 shocks    Shocks +/-

2.0 Hz    Frequency +/-

0 shocks    FOCUSED

0 shocks

Configuration    ▼    05/12/2014 14:15



DUOLITH® SD1

# DUOLITH® SD1 – комбинированная ударно-волновая терапия

## Комбинация технологий не похожая на других!

Ударная волна – это сердце любого современного ЭУВТ аппарата. Ударная волна определяет эффективность и универсальность терапевтической системы. DUOLITH® SD1 – первая комбинированная ударно-волновая терапевтическая система, которая имеет и фокусированные (F-SW) и радиальные (R-SW) ударные волны.

Выдающаяся эффективность этого инновационного ЭУВТ аппарата определяется индивидуально настраиваемым широким энер-

гетическим диапазоном. Фокусированные ударные волны служат для безопасного и эффективного лечения глубоко находящихся областей. Большая фокусная зона обеспечивает улучшенную обработку зоны лечения. Радиальные ударные волны используются преимущественно для лечения приповерхностных зон.

Оptionальный аппликатор V-ACTOR® идеален для разглаживания мышц, массажа и локализации триггерных точек.

## Отличительные особенности

- Комбинированная фокусированная/радиальная ударно-волновая система
- Сенсорный экран
- Аппликатор V-ACTOR® для вибрационной терапии (опция)
- Также может поставляться с одним только F-SW-аппликатором
- Два разъема для аппликаторов радиальных волн
- Прост в перевозке для мобильного использования
- Доступен с компрессором ENERGY II с низким уровнем шума

Сенсорный экран




Компрессор ENERGY II с низким уровнем шума



Два разъема для аппликаторов радиальных волн



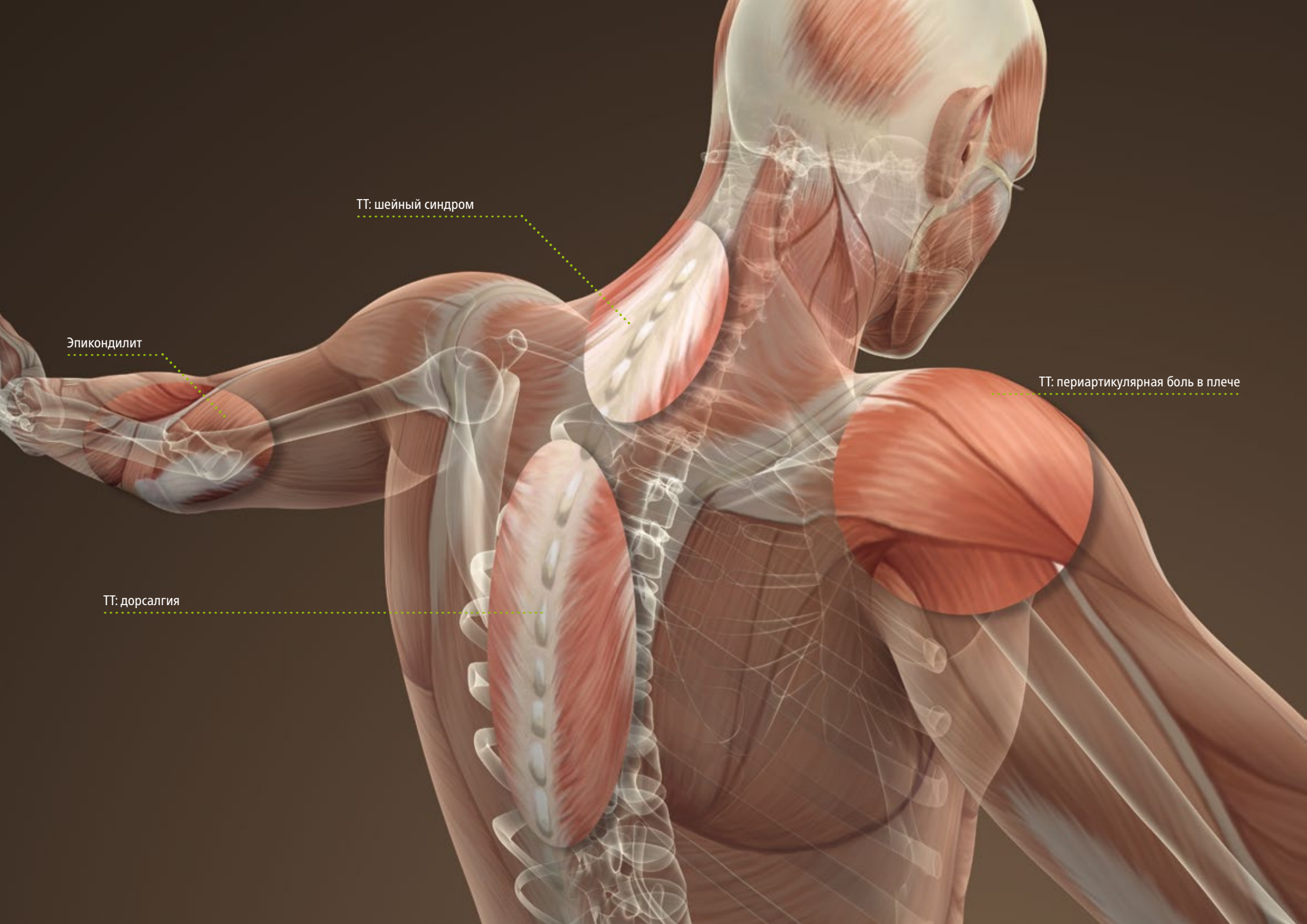

ТТ: шейный синдром

Эпикондилит

ТТ: периартикулярная боль в плече

ТТ: дорсалгия

# Облегчение боли = довольный пациент

## Примеры множества заболеваний, которые можно вылечить при помощи DUOLITH® SD1 Терапия триггерных точек

Большинство пациентов страдают от болевых состояний, на примере которых положительный эффект ударных волн может быть продемонстрирован сразу в процессе сеанса лечения.

DUOLITH® SD1 – наилучшее решение для удовлетворения высоких запросов со стороны пациентов.

Технология D-ACTOR® аппликатора радиальных волн DUOLITH® SD1 также обеспечивает быстрое и долговременное восстановление нормального мышечного тонуса – процедура обычно проводимая и в традиционной терапии триггерных зон.

Эпикондилит



Кальцинированный тендинит



Тиббиальный синдром



Пяточная шпора



Тендинит надколенника



Шейный синдром



Ахиллодиния



Плантарный фасциит



R-SW – радиальные ударные волны

F-SW – фокусированные ударные волны

V-ACTOR® – вибрационная терапия




# Всегда правильная ударная волна

## F-SW – фокусированные ударные волны

Фокусированные ударные волны преимущественно используются в лечении глубоких целевых зон. Ударно-волновой источник оборудован проверенной цилиндрической катушкой STORZ MEDICAL, которая обеспечивает оптимальную фокусную зону и стабильно высокую энергию воздействия.

В качестве опции доступен высокоэнергетический аппликатор C-ACTOR® (планарные ударные волны), который используется для лечения в дерматологии, особенно в заживлении ран.

### Насадки и глубина лечения аппликатора F-SW

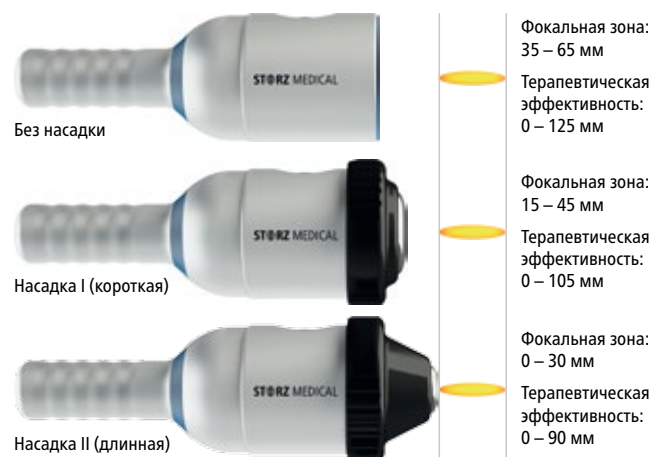

## R-SW – радиальные ударные волны

Радиальные ударные волны, генерируемые пневматическим способом, преимущественно используются в лечении приповерхностных заболеваний. Такие ударные волны распространяются веерообразно и достигают глубин до 5 см. Максимальная плотность потока энергии достигается на поверхности кожи.

Компания STORZ MEDICAL выпустила серию ударно-волновых насадок, созданных специально под индивидуальные показания применения радиальных ударных волн.

### Патентованные ударно-волновые аппликаторы




## V-ACTOR® – вибрационная терапия

Аппликатор V-ACTOR® создает вибрационные импульсы с частотой до 35 Гц. С учетом специфических физиологических сокращений тела эти виброимпульсы обеспечивают целевое лечение мышц, соединительных тканей и фасций, и активацию лимфатической системы.

Лечение ударными волнами улучшает микроциркуляцию и восстанавливает нормальную метаболическую активность в тканях. Это воздействие также эффективно в расщеплении нежелательных нарушений, таких как слипание волокон мягких тканей.

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HUMANE TECHNOLOGY – TECHNOLOGY FOR PEOPLE



**STORZ** MEDICAL

STORZ MEDICAL AG · Lohstampfstrasse 8 · 8274 Tägerwilen · Швейцария  
Телефон +41 (0)71 677 45 45 · Телефакс +41 (0)71 677 45 05 · [info@storzmedical.com](mailto:info@storzmedical.com) · [www.storzmedical.com](http://www.storzmedical.com)

Возможны технические изменения. Содержание этой брошюры предназначено только для врачей-специалистов.  
В брошюре приведена информация об изделиях, которые могут предлагаться или не предлагаться в отдельных странах.