


Функции сенсорного экрана

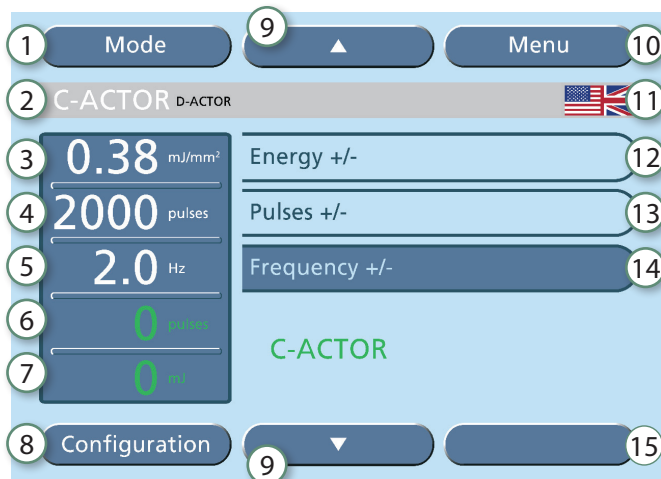

- ① Кнопка выбора режима – C-ACTOR/P-SW или D-ACTOR/R-SW
- ② Отображение активного режима (подсвечен белым)
- ③ Отображение выбранного уровня энергии
- ④ Отображение выбранного количества импульсов за сеанс
- ⑤ Отображение выбранной частоты импульсов
- ⑥ Отображение количества выпущенных импульсов
- ⑦ Отображение выпущенной энергии в режиме C-ACTOR/P-SW
- ⑧ Кнопка «Конфигурация»: отчет по пациенту или показание
- ⑨ Кнопки Увеличение/Уменьшение показателей 3-5
- ⑩ Кнопка доступа в «Меню»
- ⑪ Кнопка выбора языка
- ⑫ Кнопка выбора уровня энергии
- ⑬ Кнопка выбора количества импульсов
- ⑭ Кнопка выбора частоты
- ⑮ Общие счетчики импульсов и часов работы, номер версии программного обеспечения

Основные противопоказания:

- Беременность
 - Воспаление или опухоль в области лечения
 - Флебит или глубокий тромбофлебит нижних конечностей
 - Операция на венах ног / склеротерапия
 - Острая почечная / печеночная недостаточность
- Обязательно ознакомьтесь с полным списком противопоказаний в руководстве пользователя!



Начало работы

1. Включите главный выключатель на задней панели рядом с разъемом электропитания. Включается белый экран.
2. Подождите пока автоматическая дегазация закончится(2-3 мин.). В это время доступны все функции кроме пуска импульсов C-ACTOR / P-SW.
3. Выберите «Режим» работы C-ACTOR / P-SW или D-ACTOR / R-SW.
4. По запросу аппарата нажмите кнопку пуска ударных волн на аппликаторе C-ACTOR /P-SW для проведения теста.
5. Подтвердите выбор режима нажав на мигающие буквы на сенсорном экране.
6. Выберите значения параметров «Энергия», «Удары» и «Частота» при помощи стрелок вверх/вниз.
7. Для запуска лечения нажмите кнопку пуска ударных волн на аппликаторе.
8. Если нужно изменяйте уровень энергии и частоту при помощи стрелок(см. п.6).
9. Для окончания лечения опять нажмите кнопку пуска ударных волн на аппликаторе.
10. Нажмите «Режим» для выбора другого режима работы (C-ACTOR / P-SW или D-ACTOR/R-SW).
11. Продолжайте с пункта 5 выше.


Требуемый режим работы C-ACTOR / P-SW или D-ACTOR / R-SW может быть изменен нажатием кнопки «Режим».

Параметры могут быть изменены нажатием соответствующих кнопок:
 »Энергия +/-«
 »Удары+/-«
 »Частота +/-«

Нажмите кнопку «▲» чтобы повысить или кнопку «▼» чтобы понизить значение параметра.

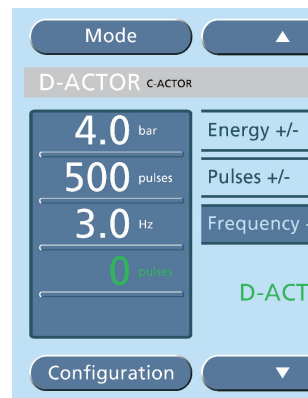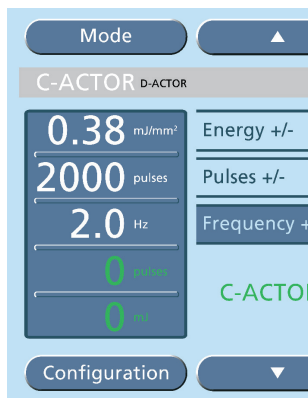

D-ACTOR аппликатор

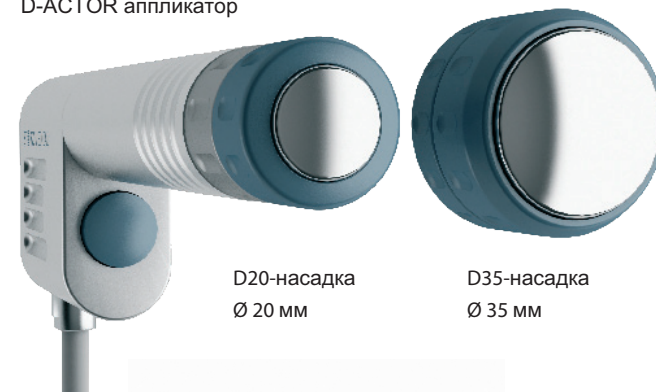

D20-насадка
Ø 20 мм

D35-насадка
Ø 35 мм



Аппликатор V-ACTOR
(дополнительный аксессуар)

C-ACTOR II / P-SW II аппликатор



Насадка I -
короткая

Насадка II -
длинная

| Показания | C-ACTOR II / P-SW II | | | | | D-ACTOR / R-SW | | | | Комментарии |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|
| | Количество сеансов ² | Частота сеансов | Импульсов на зону лечения | Энергия ³ (мДж/мм ²) | Насадка ⁴ | Импульсов на зону лечения | Энергия ³ (Бар) | Насадка ⁴ | Частота импульсов | |
| ЦЕЛЛЮЛИТ* и ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕЛА (бедро спереди и сзади, ягодицы) | | | | | | | | | | |
| 1. Стадия I и II | 8 – 10 | 1-2 в неделю | 1000 | 0.56 – 0.76 | короткая | 2500 | 2.6 – 4.0 | D20 | 12 Гц | Зоны лечения - C-ACTOR: - A, B, C, D, E, F - D-ACTOR: G, H, I, J, K, L |
| 2. Стадия III | 12 – 14 | 2 в неделю | 1500 | 0.56 – 0.76 | короткая | 3500 | 3.0 – 4.6 | D20 | 12 Гц | |
| ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕЛА | | | | | | | | | | |
| 3. Бедро | 8 – 10 | 2 в неделю | 1000 | 0.56 – 0.76 | короткая/ длинная | 2000 | 2.6 – 4.0 | D20 | 16 Гц | Зоны лечения C + D-ACTOR: Q, R |
| 4. Бока | 8 – 10 | 2 в неделю | 1000 | 0.56 – 0.76 | короткая/ длинная | 1500 | 2.6 – 4.0 | D20 | 16 Гц | Зоны лечения C + D-ACTOR: O, P Направлять ударные волны в складку кожи если возможно |
| 5. Живот | 8 – 10 | 2 в неделю | 2000 | 0.56 – 0.76 | короткая/ длинная | 4000 | 1.4 – 2.6 | D20 | 16 Гц | Зоны лечения C + D-ACTOR: S Направлять ударные волны в складку кожи если возможно |
| ПОДТЯЖКА КОЖИ | | | | | | | | | | |
| 6. Внутренняя поверхность бедер | 6 – 8 | 1 в неделю | 1000 | 0.45 – 0.76 | короткая | 2000 | 2.0 – 3.6 | D20 | 16 Гц | Зоны лечения C + D-ACTOR: A, B, G, H |
| 7. Рука от локтя до плеча | 6 – 8 | 1 в неделю | 750 | 0.45 – 0.76 | длинная | 1500 | 2.0 – 3.6 | D20 | 16 Hz | Зоны лечения C + D-ACTOR: M, N |
| ЛЕЧЕНИЕ ТКАНЕЙ | | | | | | | | | | |
| 8. Рубцы, шрамы | 6 – 8 | 1 в неделю | 100/см ² | 0.15 – 0.30 | длинная | - | - | - | - | |
| 9. Полоски, растяжки | 6 – 8 | 1 в неделю | 3000 | 0.25 – 0.56 | длинная | 3000- | 2.0 - 3.0- | D20 | 16 Гц | Зоны лечения C-ACTOR: Q, R, S |

V-ACTOR: Используйте дополнительный вибрационный аппликатор 3-5 мин. после каждого сеанса лечения.

Зоны лечения:

C-ACTOR⁶


Бедро, ягодицы, живот

D-ACTOR⁵ и C-ACTOR⁶

Верхняя часть руки

D-ACTOR⁵

Бедро, ягодицы, живот

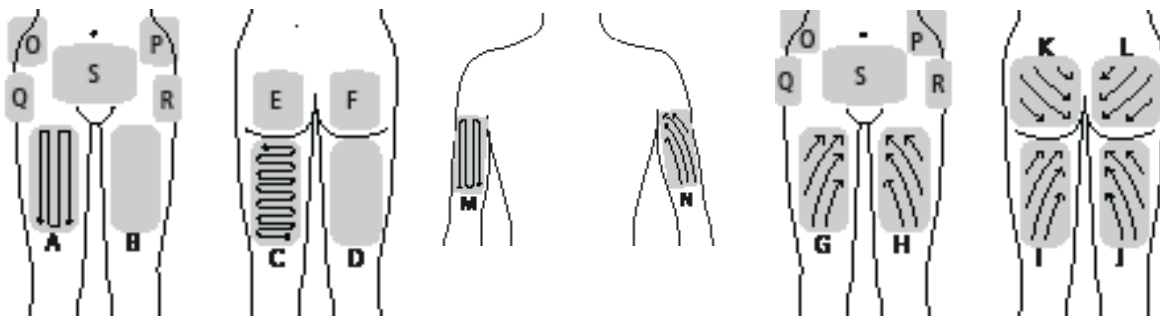

Примечание

- 1 Стадия целлюлита определяется тестом пощипывания:
На стадии 0 кожа в норме – Стадия I „апельсиновая корка“ появляется при пощипывании
Стадия II „апельсиновая корка“ видна в стоячем положении – Стадия III „апельсиновая корка“ видна и в стоячем и в лежачем положении.
- 2 Перерыв в терапии как минимум 2 дня после каждого сеанса.
- 3 Уровень энергии выбирать в зависимости от болевой чувствительности пациентки.
- 4 Используйте достаточно УЗИ-геля или антицеллюлитного масла для обеспечения наилучшей передачи энергии в тело пациентки. Не экономьте УЗИ-гель.
- 5 В режиме D-ACTOR / R-SW двигайте аппликатор в направлении лимфотока.
- 6 В режиме C-ACTOR / P-SW двигайте аппликатор зигзагами по зоне лечения на средней скорости.

Дополнительные меры

- ▶ Физ.упражнения (30 мин.) как минимум 1-2 раза в неделю
- ▶ Сбалансированное питание (диета если требуется)
- ▶ Пить много жидкости: 2 – 3 л воды/зеленого чая в день, 0.5 литра сразу после терапевтической процедуры

Это краткое справочное руководство не заменяет основное руководство пользователя, которое необходимо внимательнейшим образом изучить, особенно касаясь противопоказаний.